

signia

Life sounds brilliant.

Hør lydens farger.

Tilbehør for høreapparater.



[signia-hearing.no/
apps-and-accessories](https://signia-hearing.no/apps-and-accessories)

Hearing
Systems

SIEMENS



Tilpass hørselsopplevelsen.

Følg barna til skolen om morgenen, møt venner til frokost og se fjernsyn om kvelden. Hver dag er full av ulike lyttesituasjoner og samtaler. Ville det ikke vært fantastisk om du kunne streame lyd direkte til ørene dine, samt justere og lade opp høreapparatene på en enkel måte?

Streaming

easyTek/easyTek App	s. 6
---------------------	------

Nedlasting av app

Nedlasting av app	s. 13
-------------------	-------

Fjernkontroll

touchControl App	s. 14
miniPocket	s. 16
easyPocket	s. 17

Tilbehør

VoiceLink	s. 18
TV Transmitter	s. 18
eCharger	s. 19
Biladapter	s. 19

Praktisk tilbehør.

Vær tilkoblet og ha full kontroll.

Oversikt



Høreapparatene dine hjelper deg gjennom dagen, og tilbehøret gjør det enda mer fleksibelt.

Vårt store utvalg av elegant og praktisk tilbehør gjør hverdagen enklere, enten det måtte være å endre innstillinger ved hjelp av fjernkontroll, streame lyd, eller lade høreapparatene.

Riktig tilbehør kan gi lettere tilgang på funksjonene til høreapparatet, og gir deg tryggheten som følger med at du har full kontroll. Forestill deg hvor befriende det vil være å kunne bytte programmer på en diskret måte, eller endre volumet bare ved et lite trykk på smarttelefonen, å gi en mikrofon til en taler slik at du kan høre hvert eneste ord, klart og tydelig, eller ganske enkelt plassere høreapparatene i en lader over natten slik at du alltid er klar for neste dag.

easyTek og easyTek App



touchControl App

TV Transmitter



VoiceLink

easyPocket



miniPocket



eCharger

easyTek og easyTek App.

Forsterker lytteopplevelsen og komforten - helt diskret.

Forestill deg den klare lyden av en telefonsamtale, et TV-program eller musikk som streames direkte til ørene. easyTek™ gjør det - og mer. Den bæres rundt halsen, utenpå eller skjult under klærne, og holder deg tilkoblet ved å streame lyd direkte til høreapparatene, eller ved å fungere som en fjernkontroll. Når den kombineres med easyTek™-appen for smarttelefoner med Android eller iOS, kan du også bruke telefonen til å justere programmer og volum.



easyTek og easyTek App


easyTek.

Teknologi som er enkel å bruke.

Det er enkelt å gjøre om trådløse høreapparater til et stereo headset av høy kvalitet. Med den smarte multifunksjonsknappen er det enkelt å slå easyTek på og av, svare på telefonsamtaler, endre lytteprogrammer eller enkelt bytte lydkilder som musikkspillere, fjernsyn og mer – alt med bare én knapp.

Det er hurtig og lett å endre på lydstyrken på høreapparatene. LED-lysene gir deg viktige opplysninger, som for eksempel at det er på tide å lade batteriet.

Streaming

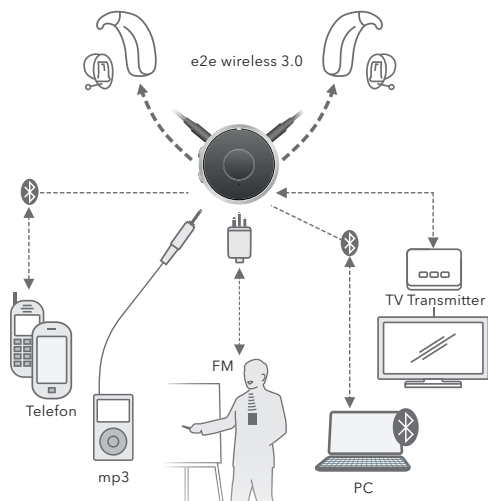

Med easyTek kan du koble høreapparatene til iPhone, iPad, Android-enheter og til alle telefoner med Bluetooth-funksjonalitet.

Streaming

easyTek i detalj.




- 1 Multifunksjonsknapp
- 2 Halsslynge med innebygget antenne
- 3 Mikrofonåpninger
- 4 Statusinformasjon med LED-indikatorer
- 5 Inngang for halsslynge
- 6 Volumknapper
- 7 Port for lydenheter med 3,5 mm plugg
- 8 Port for FM-mottaker
- 9 Resetknapp
- 10 Port til micro-USB for lading

Paring av easyTek.

Settes opp på 1, 2, 3.

Før du kan dra nytte av alle fordelene easyTek har å tilby, må du pare den med dine høreapparater eller andre enheter. Bare følg de enkle stegene på denne eller neste side.

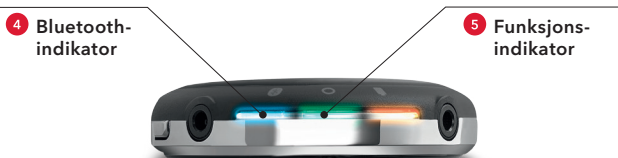

Paring av easyTek med dine høreapparater



Steg 1:

Heng easyTek rundt halsen. Skru på easyTek ved å trykke på 1 til den grønne LED-lampen 5 lyser.



Steg 2:

Sett høreapparatene dine inn i ørene og skru dem på. Det grønne LED-lyset 5 blinker kort før lyset blir borte. Nå er dine høreapparater parete med easyTek.

Streaming

Paring av easyTek med Bluetooth-aktiverte enheter



Steg 1:

Skru på easyTek ved å trykke på og holde inne 1 i flere sekunder. Hvis det blå LED-lyset 4 ikke blinker automatisk, trykk 1 og 2 til den gjør dette.



Steg 2:

Gå inn på instillinger for Bluetooth på enheten du ønsker å pare med easyTek. Skru på funksjonen, søk etter easyTek og velg den. Det blå LED-lyset 4 blinker kort før lyset blir borte.

Paring av easyTek med TV Transmitter

Alternativ 1



Steg 1:

Skru på easyTek ved å presse og holde inne 1 i flere sekunder. Trykk på 1, 2 og 3 samtidig til det blå LED-lyset 4 blinker.



Steg 2:

Skru på TV Transmitteren maksimalt én meter fra din easyTek og vent på at paringen blir komplett. Dette tar ca to minutter. Det blå LED-lyset 4 slutter å blinke og forblir på.

Alternativ 2



Steg 1:

Åpne easyTek appen på din smarttelefon. Trykk på menyknappen nederst i høyre hjørne. Trykk på "Transmittere" og velg "+"-tegnet øverst i høyre hjørne. Trykk på "Scan kode".

For informasjon om nedlasting av app, se s. 13.



Steg 2:

Skann QR-koden som er på baksiden av TV Transmitteren. Du kan få spørsmål om du vil gi appen tilgang til kamera. Trykk "ja".


easyTek App.

Mer diskret, mer praktisk, flere muligheter.




easyTek-appen gir easyTek større funksjonalitet, samtidig som den gjør den mer diskret.

easyTek-appen lar deg se statusen til høreapparatene dine på smarttelefonen, streame lyd fra lydkilder eller bruke den som fjernkontroll. Siden du kan foreta alle justeringer med smarttelefonen, vil det se ut som om du kun leser en melding når du egentlig endrer innstillingene til høreapparatene dine.

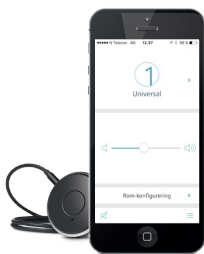

Hovedskjerm

Fra hovedskjermen til easyTek-appen har du rask tilgang til viktige funksjoner som volum eller demping, og til grunnleggende informasjon som hvilket program du bruker.

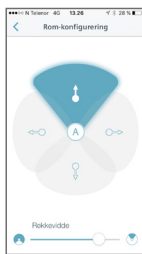

Høreapparatets funksjoner

Takket være det brukervennlige grensesnittet, kan du enkelt kontrollere mer presist hvordan du ønsker å høre, f.eks. fokusere på personen til venstre for deg på en restaurant ved å bruke Rom-konfigurering.

Nedlasting av app.

Lett å bruke, lett å finne!

Last ned easyTek-appen eller touchControl-appen til Android- eller iOS-telefonen fra Google Play eller Apple App Store. Det beste er at det er gratis å laste ned!

Steg 1:



Sørg for at du har en Google Play-konto for din Android-telefonen eller en Apple App Store-konto for din iPhone.

Steg 2:



Logg deg inn på Google Play- eller på Apple App Store-kontoen med smarttelefonen. Søk opp easyTek- eller touchControl-appen.

Steg 3:



Følg instruksjonene for å installere appen på din smarttelefonen.

Steg 4:




Opplev hvor enkelt det er å styre høreapparatene med den nye appen. Kontakt din hørselsspesialist hvis du har spørsmål.



touchControl App.

Enkel og diskret.

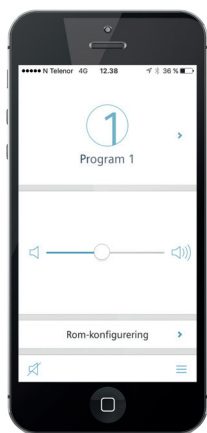


Med touchControl™-appen gjør du smarttelefonen om til en diskret fjernkontroll for høreapparatene dine. Du kan se statusen til høreapparatene dine og foreta justeringer på en svært enkel og diskret måte. Med rom-konfigurering kan du tilpasse dine høreapparater ut i fra hvilke omgivelser du befinner deg i.

Rom-konfigurering.


For å få full kontroll over lyttingen og tilgang til "Rom-konfigurering", må touchControl appen settes opp til dine høreapparater. Følg de enkle stegene under for å sette opp "Rom-konfigurering" på din app.

Steg 1:

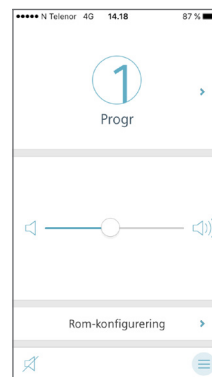

Åpne touchControl-appen på din smarttelefon. Trykk på menyknappen med streker nederst i høyre hjørne.

Steg 2:

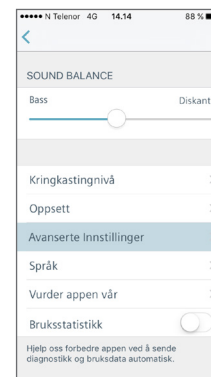

Velg "Avanserte innstillinger".

Steg 3:



Velg "Ytelsesnivå 7". Du har nå tilgang til Rom-konfigurering.

Steg 4:



Gå tilbake til startskjermen på appen og trykk på "Rom-konfigurering". Her kan du endre retningen fra hvor du ønsker å høre og samtidig undertrykke støy fra omgivelsene.

miniPocket.


Diskret kontroll rett i hånden.



Den ideelle løsningen for de som ønsker diskret og brukervennlig kontroll av sine høreapparater, uten behovet for store fjernkontroller eller en smarttelefon. Pålitelig og enkel i bruk, miniPocket™* er liten nok til å brukes på en nøkkelring, og har likevel nok kraft til å stryre alle de essensielle funksjonene i høreapparatet.

* Tilgjengelig fra høsten 2016.

miniPocket i detalj.

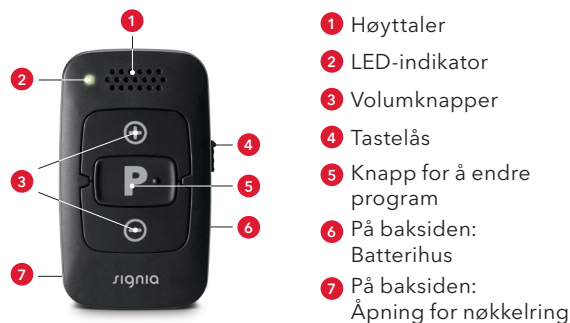

easyPocket.

Den elegante easyPocket™, med store knapper og lettlest display, gjør det enkelt å justere funksjonene på høreapparatene dine.

easyPocket

Flere streamingmuligheter.

For å høre tydeligere i støyende omgivelser og hjemme.



VoiceLink

VoiceLink.

VoiceLink™ minimikrofon kan trådløst kobles opp til easyTek. Når den gis til en som taler, kan den streame direkte til dine høreapparat – noe som er spesielt hjelpsomt i vanskelige lyttesituasjoner, som for eksempel under møter, konferanser eller presentasjoner.



TV Transmitter

TV Transmitter.

TV Transmitter* kobler TV-er uten Bluetooth-funksjonalitet til easyTek. På denne måten kan du streame lyd trådløst og direkte til dine høreapparater, og blant annet nyte dine favorittfilmer.

* Tilgjengelig fra høsten 2016.

Lader.

Ikke gå tom for strøm.



eCharger

eCharger.

Frisk opp høreapparatene: eCharger lader opp og avfukter høreapparatene over natten, slik at du ikke trenger å tenke på å bytte batterier.



Biladapter

Biladapter.

Med det valgfrie biladapteret kan du ta med deg din eCharger selv om du er ute på veien. Du kan lade dine høreapparater uansett hvor du går.

Hvis du er usikker på hvilke tilbehør som er kompatible med høreapparatene dine, vil din hørselsspesialist kunne hjelpe deg.

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser av de tilgjengelige tekniske alternativene, som ikke alltid er tilgjengelig i alle tilfeller, og som kan endres uten forvarsel.

Varemerket Bluetooth og tilhørende logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Sivantos gjøres under lisens. Andre varemerker og produktnavn eies av sine respektive innehavere.

Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc. Apple App Store er et varemerke tilhørende Apple Inc.

Juridisk produsent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Sivantos AS bruker varemerket Siemens i henhold til kontrakt med Siemens AG.

Lokal kontaktinformasjon

Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 63 22 22
www.signia-hearing.no

Postadresse:

PB 378 Sentrum
0102 Oslo

PrintHouse.61160/1/1000/0816
Order No. 02922-99C1-7600 | © 07.2016 Signia GmbH

Finn oss på:

signia-hearing.no

facebook.com/SigniaHearingNorway

youtube.com/signiahearing