

CROS Pure Charge&Go Nx sender

Bruksanvisning



Innhold

Velkommen	4
<hr/>	
Din CROS-sender	5
<hr/>	
Komponenter og navn	7
Kontroller	9
Lytteprogrammer	10
Funksjoner	10
Signaltoner	10
Daglig bruk	11
<hr/>	
Lade	11
Slå på og av	12
Skifte til hvilemodus	13
Sette inn og ta ut senderen	14
Justere volumet	18
Skifte lytteprogram	18
Vedlikehold og pleie	19
<hr/>	
Høreapparater	19
Dome	21
Profesjonelt vedlikehold	23
Viktig sikkerhetsinformasjon	24
<hr/>	

Mer informasjon	26
Sikkerhetsinformasjon	26
Tilleggsutstyr	26
Symbolforklaringer	27
Drifts-, transport- og lagringsforhold	28
Informasjon om avfallshåndtering	29
Feilsøking	30
Samsvarsinformasjon	31
Viktig sikkerhetsinformasjon	33
Personsikkerhet	33
Produktsikkerhet	36
Service og garanti	38

Velkommen

Takk for at du valgte vårt høreapparattilbehør.

Denne veiledningen, sammen med støtte fra høreapparatspesialisten, vil gi deg bedre forståelse av fordelene og forbedringene i livskvalitet som dette tilbehøret kan gi deg.



FORSIKTIG


Det er viktig å lese hele denne bruksanvisningen nøye. Følg sikkerhetsinformasjonen for å unngå materiell skade eller personskade.

Din CROS-sender

CROS-løsningene er beregnet for mennesker med alvorlig hørselstap på ett øre, som ikke får hjelp av et høreapparat. En CROS-sender på dette øret fanger opp lyd fra denne siden og overfører den til høreapparatet på det andre øret. Dette gjør at brukeren av høreapparatet kan høre lyder fra begge sider.

CROS Sender

Høreapparat

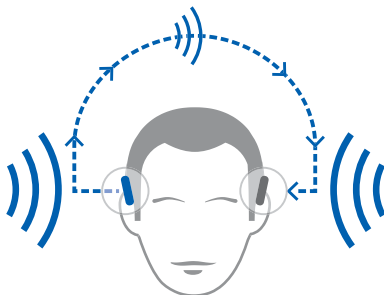

To løsninger er tilgjengelige:

- CROS-løsning:

For personer med normal hørsel på det ene øret og alvorlig hørselstap på det andre. Lyder fra siden med hørselstap fanges opp og sendes trådløst til siden med god hørsel.

- BiCROS-løsning:

For personer med alvorlig hørselstap på det ene øret og mindre alvorlig hørselstap på det andre. Lyder fra siden med mest alvorlig hørselstap fanges opp og sendes trådløst til siden med bedre hørsel. Høreapparatet bearbejder og forsterker lydene fra begge sider.


CROS-senderen fungerer med bestemte trådløse høreapparater. Høreapparatspesialisten vil gi deg råd om de kompatible modellene.



NB!

Denne brukerveiledningen gjelder bare for CROS-senderen. Høreapparatet har en egen brukerveiledning.

Komponenter og navn

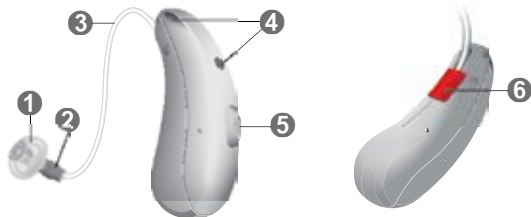

1 Dome

2 Høytaler





3 Receiver

4 Mikrofonåpninger

5 Trykknapp
(kontroll, av/på-bryter)



6 Sideindikator
(rød = høyre øre,
blå = venstre øre)
og receiverfeste

Du kan bruke følgende standard domer:

Standard domer	Størrelse
<input type="radio"/>  Click Sleeve (åpen eller tett)	
<input type="radio"/>  Click Dome™ (åpen eller tett)	
<input type="radio"/>  Click Dome semi-open	
<input type="radio"/>  Click Dome dobbel	

Du kan enkelt skifte ut standard dome. Les mer i avsnittet "Vedlikehold og pleie".

Tilpassede propper/skall

<input type="radio"/>  Tilpasset propp	
<input type="radio"/>  Click propp	

Kontroller

Med trykknappen kan du, for eksempel, skifte lytteprogrammer. Høreapparatspesialisten har programmert funksjonene du ønsker til trykknappen.

Trykknappfunksjon	V	H
Lett trykk:		
Program opp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Øk lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reduser lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå opp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-streaming på/av	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hold i ca. 2 sekunder:		
Program opp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Øk lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reduser lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå opp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-streaming på/av	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivere/deaktivere flymodus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hold i mer enn 3 sekunder:		
Slå på/av	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V = venstre, H = høyre



Du kan også bruke en fjernkontroll til å endre og justere volumet på dine høreapparater. Med vår smarttelefon-app har du enda flere kontrollmuligheter.

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Les mer i delen "Skifte lytteprogram".

Funksjoner



Funksjonen for behandling av tinnitus lager en lyd for å distrahere deg fra tinnitus.

Signaltoner

Signaltoner fra CROS-senderen, som fra et svakt batteri, sendes til høreapparatet.

Be høreapparatspesialisten om å konfigurere signaltonene.

Daglig bruk

Lade

Sett høreapparatene dine inn i laderen.

- ▶ Følg anvisningene i bruksanvisningen for laderen. Du kan også finne nyttige tips om lading i bruksanvisningen for laderen.



Varsel om lavt strømnivå

Du vil høre et lydsignal som varsler om at det er lite strøm på strømcellen. Signalet gjentas hvert 20. minutt. Avhengig av bruken av høreapparatene, må du nå lade høreapparatene i løpet av omtrent 1,5 timer. Ellers slutter de å fungere.

Slå på og av

Du har følgende valgmuligheter for å slå høreapparatene på eller av.

Via lader:

- ▶ Slå på: Ta apparatene ut av laderen.
Oppstartmelodien spilles i høreapparatene dine.
Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
- ▶ Slå av: Sett høreapparatene inn i laderen.

Husk at laderen må være koblet til strømforsyningen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for laderen.

Via trykknapp:

- ▶ Slå på: Trykk inn trykknappen, og hold den inne til avspillingen av oppstartmelodien begynner. Slipp trykknappen mens melodien spilles.
Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
- ▶ Slå av: Trykk og hold trykknappen inne i flere sekunder.

Se også tips om lading i bruksanvisningen for laderen.

Skifte til hvilemodus

Med en fjernkontroll eller en smarttelefonapp kan du sette høreapparatene dine i hvilemodus. Dette slår av lyden på høreapparatene. Når du går ut av hvilemodus, vil **tidligere** brukt lydstyrke og lytteprogram stilles inn.

Merknad:

- I hvilemodus er høreapparatene **ikke** slått helt av. De bruker litt strøm.

Vi anbefaler derfor at du bare bruker hvilemodus i korte perioder.

- Hvis du vil gå ut av hvilemodus og fjernkontrollen eller appen ikke er innen rekkevidde: Slå høreapparatene av og på igjen (med trykknappen eller ved å plassere dem en kort tid i laderen, til en eller flere oransje LED-lamper lyser). I dette tilfellet stilles **standard** lydstyrke og lytteprogram inn.

Sette inn og ta ut senderen

Fargede markører indikerer siden:


- rød markør = høyre øre
- blå markør = venstre øre



Sette inn:

- For Click Sleeves, pass på at den bøyde delen på Click Sleeve stemmer med den bøyde delen på receiveren.

Riktig:

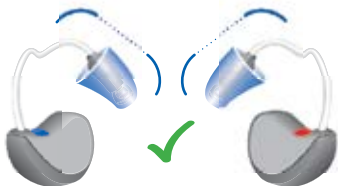


Feil:



- ▶ Hold receiveren etter den bøyde delen som er nærmest domen/proppen.
- ▶ Sett domen/proppen forsiktig inn i ørekanalen ①.
- ▶ Vri det noe til det sitter godt fast.

Åpne og lukk munnen for å unngå at luft samles i øregangen.

- ▶ Løft enheten og før den over øvre del av øret ②.

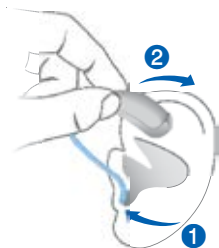

FORSIKTIG

Skadefare!

- ▶ Sett inn domen/proppen forsiktig og ikke for dypt inn i øret.



- Det kan være nyttig å sette inn **høyre** enhet med **høyre** hånd og **venstre** enhet med **venstre** hånd.
- Dersom du har problemer med å sette inn domen, bruker du den andre hånden til å forsiktig dra ned øreflippen. Dette åpner øregangen og gjør det enklere å sette inn domen/proppen.


Den ekstra støttråden hjelper til med å holde domen/
proppen sikkert på plass i øret. Sette støttråden i
posisjon:

- ▶ Bøy støttråden og plasser den
forsiktig inn i øret (se bildet).



Ta ut:

- ▶ Løft enheten og før den over øvre del av øret ①.
- ▶ Dersom enheten er utstyrt med en tilpasset propp eller en Click propp, fjerner du denne ved å dra den lille uttrekkstråden mot bakhodet.

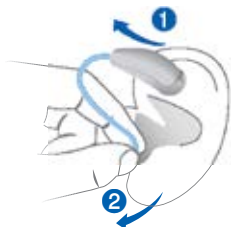

- ▶ For alle andre domer: Ta høyttaleren i ørekanalen med to fingre og dra den forsiktig ut ②.

Ikke trekk i receiveren.



FORSIKTIG

Skadefare!

- ▶ I svært sjeldne tilfeller kan domen forbli i øret når enheten fjernes. Hvis dette skjer, må du få domen fjernet av en person i helsevesenet.

Rengjør og tørk av enheten etter bruk. Les mer i delen "Vedlikehold og pleie".

Justere volumet

Høreapparatene dine justerer automatisk lydstyrken etter lyttesituasjonen.

- ▶ Hvis du foretrekker manuell volumjustering, kan du trykke på trykknappen.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av trykknappen.

Et ekstra signal kan indikere endringen av lydstyrken. Straks maksimalt eller minimalt volum er nådd, kan du høre en ekstra signaltone.

Skifte lytteprogram

Avhengig av lyttesituasjonen, justerer høreapparatene automatisk lyden.

Høreapparatene kan også ha flere lytteprogrammer som lar deg endre lyden etter behov. En ekstra signaltone kan indikere endringen av programmet.

- ▶ Trykk kort på trykknappen for å skifte lytteprogrammet.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av kontrollene.

Du finner en liste med lytteprogrammene dine i avsnittet "Lytteprogrammer".

Standardvolumet gjelder.

Vedlikehold og pleie

For å forhindre skade, er det viktig at du tar vare på høreapparatene og følger noen grunnleggende regler, som snart blir en del av din daglige rutine.

Høreapparater

Rengjøring

Høreapparatet har et beskyttende belegg. Hvis det derimot ikke rengjøres regelmessig kan du skade høreapparatene eller forårsake personskade.

- ▶ Rengjør høreapparatet daglig med en myk, tørr klut.
- ▶ Aldri bruk rennende vann eller senk høreapparatene ned i vann.
- ▶ Bruk aldri makt når du rengjør.
- ▶ Spør høreapparatspesialisten om anbefalte rengjøringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett eller mer informasjon om hvordan du holder høreapparatene i god stand.



Tørke

Laderen tørker høreapparatene under ladingen. Du kan også bruke tradisjonelle produkter til å tørke høreapparatene med. Spør din høreapparatspesialist om anbefalte tørkeprodukter og individuell informasjon om når du skal tørke høreapparatene dine.

Oppbevaring

- Korttidslagring (noen dager): Slå av høreapparatene med trykknappen, eller sett dem i den tilkoblede laderen.

Laderen må være koblet til strømforsyningen. Hvis du plasserer høreapparatene i laderen når den ikke er koblet til strømforsyningen, slås **ikke** høreapparatene av.

Vær oppmerksom på at når du slår av høreapparatene med en fjernkontroll eller en app på smarttelefonen, er høreapparatene **ikke** slått helt av. De er i hvilemodus og bruker fremdeles litt strøm.

- Langtidslagring (uker, måneder, ...): Først må du lade høreapparatene helt opp. Slå dem av med trykknappen før du lagrer dem. Vi anbefaler bruk av tørkeprodukter under lagring av høreapparatene.

Med 6 måneders mellomrom må du lade opp høreapparatene for å unngå dyputlading av strømcellen. Strømceller som er dyputladet, kan ikke lades på nytt og må skiftes ut. Vi anbefaler opplading oftere enn med 6 måneders mellomrom.

Overhold lagringsbetingelsene i delen "Drifts-, transport- og lagringsforhold".

Dome


Rengjøring

Cerumen (ørevoxs) kan samles opp på domene. Dette kan påvirke lyd kvaliteten. Rengjør domene daglig.

For alle typer domer/propper:


- Rengjør domen/proppen med et mykt og tørt lommetørkle rett etter at den er fjernet.

Dette forhindrer at cerumen blir tørr og hard.

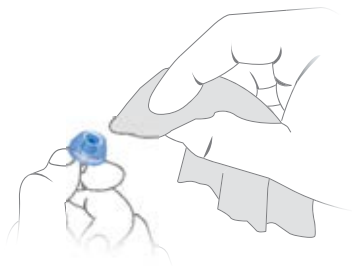

For Click Domes eller Click Sleeves:

- Klem spissen på domene.

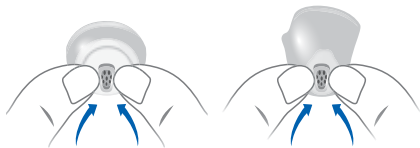


Utskifting

Skift ut standard dome omtrent hver tredje måned. Skift dem ut oftere hvis du oppdager sprekker eller andre endringer. Fremgangsmåten for utskifting av standard dome avhenger av type dome. I delen "Komponenter og navn", har høreapparatspesialisten merket din type dome.

Skifte ut Click Domes

- ▶ For å fjerne den gamle Click Dome, bruker du fjerningsverktøyet eller følger anvisningene på emballasjen til Click Domes. Pass på at du ikke trekker i receiveren.

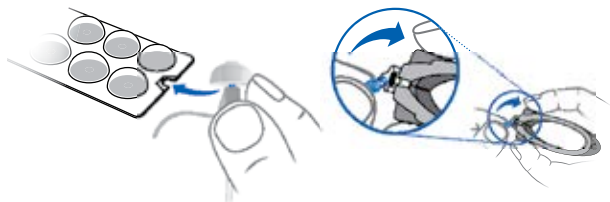

Fjerningsverktøyet er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

- ▶ Vær spesielt nøye med at den nye Click Dome klikker på plass.
- ▶ Kontroller at den nye Click Dome sitter godt fast.



Skifte ut Click Sleeves

- ▶ Vri Click Sleeve med innsiden ut.
- ▶ Grip Click Sleeve og høyttaleren (ikke receiveren) med fingrene og trekk av Click Sleeve.
- ▶ Vær spesielt nøye med at den nye Click Sleeve klikker på plass.



Profesjonelt vedlikehold

Høreapparatspesialisten kan utføre en grundig profesjonell rengjøring og vedlikehold.

Tilpassede skall/propper og voksfiltre bør skiftes ut av en høreapparatspesialist ved behov.

Kontakt høreapparatspesialisten for informasjon om hvor ofte du må utføre vedlikehold og for å få teknisk hjelp.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne delen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon om strømcellen. Se sikkerhetshåndboken som ble levert med høreapparatene for ytterligere sikkerhetsinformasjon.



ADVARSEL

En strømcelle (oppladbart lithium-ion batteri) er permanent innebygd i høreapparatet ditt. Feil bruk av strømcellen eller høreapparatet kan få strømcellen til å revne.

Fare for personskader, brann eller eksplosjon!

- ▶ Følg sikkerhetsanvisningene for strømceller i denne delen.

- ▶ Overhold driftsbetingelsene. Se delen "Drifts-, transport- og lagringsforhold".
- ▶ Det er ekstra viktig å beskytte høreapparatene mot ekstrem varme (f.eks. åpen ild, mikrobølgeovn, induksjonsovn eller andre induksjonsfelt) og sollys.
- ▶ Bruk bare den godkjente laderen til å lade opp høreapparatene dine. Be din høreapparatspesialist om hjelp.
- ▶ Ikke demonter strømcellen.

Utskifting og reparasjon må utføres av fagfolk. Derfor:

- ▶ Ikke reparer eller skift ut strømcellen på egen hånd.
- ▶ Ikke bruk høreapparatene når deres ytelse etter lading reduseres vesentlig.
- ▶ Hvis en strømcelle skulle sprekke eller eksplodere, noe som er usannsynlig, må alle brennbare materialer holdes borte fra den.

I alle de nevnte tilfellene må du levere høreapparatene dine inn til høreapparatspesialisten.

Mer informasjon

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetshåndboken som ble levert med enheten for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Tilleggsutstyr

Du kan bruke myControl App som en praktisk fjernstyring av dine høreapparater. Appen lar deg også deaktivere signaltoner, opprette individuelle lydprofiler og mange andre funksjoner.

Du kan også bruke en fjernkontroll.

Spør din høreapparatspesialist om ytterligere informasjon.

Symbolforklaringer

Symboler som brukes i dette dokumentet



Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Indikerer mulig materiell skade.



Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten.

Symboler på enheten eller emballasjen



CE-samsvarsinformasjon, bekrefter samsvar med visse europeiske direktiver, se delen "Samsvarsinformasjon".



EMC og radiokommunikasjon samsvarsmerke for Australia, se delen "Samsvarsinformasjon".



Angir enhetens godkjente produsent.



Ikke kast enheten med husholdningsavfall. Les mer i delen "Informasjon om avfallshåndtering".



Les og følg anvisningene i bruksanvisningen.

Drifts-, transport- og lagringsforhold

Høreapparatene opererer under følgende forhold (gjelder også mellom bruk):

Driftsvilkår	Utlading	Lade
Temperatur	0 til 50 °C (32 til 122 °F)	10 til 35 °C (50 til 95 °F)
Relativ luftfuktighet	5 til 93 %	5 til 93 %
Atmosfærisk trykk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Under lengre perioder med transport og lagring må følgende betingelser overholdes:

	Oppbevaring	Transport
Temperatur (anbefalt)	10 til 25 °C (50 til 77 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Temperatur (maksimalt spekter)	10 til 40 °C (50 til 104 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Relativ luftfuktighet (anbefalt)	20 til 80 %	5 til 90 %
Relativ luftfuktighet (maksimalt spekter)	10 til 80 %	5 til 90 %
Atmosfærisk trykk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Vær oppmerksom på at du må lade opp apparatene minst hver 6 måned. For mer informasjon, se avsnitt "Vedlikehold og pleie".

Andre betingelser kan gjelde for andre deler, for eksempel laderen.



ADVARSEL

Fare for personskader, brann eller eksplosjon under transport.

- ▶ Transporter strømceller og høreapparater i samsvar med gjeldende forskrifter.

Informasjon om avfallshåndtering

- ▶ For å unngå miljøforurensning må du ikke kaste strømcellene eller høreapparatene sammen med husholdningsavfallet.
- ▶ Resirkuler strømcellene og høreapparatene i samsvar med gjeldende forskrifter.

Feilsøking

Problem og mulige løsninger

Lyden er svak.

- Øk lydstyrken.
 - Lad opp høreapparatet.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
-

Høreapparatet avgir pipelyder.

- Prøv å sette domen/proppen inn på nytt til den sitter godt fast.
 - Demp lydstyrken.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
-

Lyden er fordreid.

- Demp lydstyrken.
 - Lad opp høreapparatet.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
-

Høreapparatet sender ut signaltoner.

- Lad opp høreapparatet.
-

Høreapparatet fungerer ikke.

- Slå på høreapparatet.
 - Lad opp høreapparatet. Følg også med på status LED-lampene på laderen.
-

Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du opplever ytterligere problemer.

Samsvarsinformasjon

CE-merkingen indikerer samsvar med følgende europeiske direktiver:

- 93/42/EEC vedrørende medisinske apparater
- 2014/53/EU RED vedrørende radioutstyr
- 2011/65/EU RoHS vedrørende begrensning av farlige stoffer

Full tekst til samsvarserklæringen kan hentes fra www.signia-hearing.com/doc.

ACMA-samsvarsmerket  indikerer samsvar med standardene for elektromagnetisk interferens fra Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Enheter med FCC-merke er i overensstemmelse med standardene med FCC for elektromagnetisk interferens.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og ISEDs lisensfritatte RSS-spesifikasjoner.

Bruk må skje under følgende to betingelser:

- apparatet må ikke forårsake skadelig interferens.
- apparatet må tåle eventuell interferens det måtte motta, inklusive interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksene, forårsake forstyrrende interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker forstyrrende interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe du kan fastslå ved å slå utstyret av og på, oppfordrer vi brukeren til å forsøke å korrigere denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og høyttaleren.
- Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den det andre utstyret er koblet til.
- Be om hjelp fra forhandleren, eller en erfaren radio-/ fjernsynstekniker.

FCC-forholdsregel: Endringer og modifikasjoner som ikke er offisielt godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å betjene utstyret ugyldig.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Personsikkerhet

Denne enheten er ikke ment for barn under 3 år eller personer med en mental alder på under 3 år.



FORSIKTIG

Skadefare!

- ▶ Alltid bruk receiveren med en dome.
- ▶ Forviss deg om at domen er helt festet.



ADVARSEL

Fare for påvirkning av elektronisk utstyr!

- ▶ I områder hvor bruk av elektroniske eller trådløse enheter er begrenset, må du sjekke om enheten din må slås av.



ADVARSEL

Skadefare!

- ▶ Ikke bruk enheter som har åpenbare skader, men returner dem til salgsstedet.



ADVARSEL

Legg merke til at uautoriserte endringer av produktet kan føre til skade på produktet eller personskade.

- ▶ Bruk kun godkjente deler og tilbehør. Be din høreapparatspesialist om hjelp.



ADVARSEL

Kvelningsfare!

Apparatet ditt inneholder små deler som kan svelges.

- ▶ Hold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og psykisk utviklingshemmede.
- ▶ Ved svelging av deler, oppsøk straks lege eller sykehus.



ADVARSEL

Enheten kan redusere enkelte bakgrunnslyder, potensielt også trafikk- eller varselsignaler.



ADVARSEL

Eksplisjonsfare!

- ▶ Ikke bruk enheten din i eksplosive atmosfærer (f.eks. i gruver).

Kontraindikasjoner



ADVARSEL

Ta kontakt med en høreapparatspesialist hvis du opplever uvanlige bivirkninger som hudirritasjon, ekstrem oppsamling av ørevoks, svimmelhet, endring av hørsel eller hvis du tror at det kan være en fremmedgjenstand i ørekanalen.



ADVARSEL

En høreapparatspesialist bør gi råd til en mulig bruker av høreapparat om å ta kontakt med en lisensiert lege før bruk av høreapparatet hvis høreapparatspesialisten fastslår av brukeren har en av følgende lidelser:

- ▶ Synlig medfødt eller traumatisk misdannelse av øret.
- ▶ Tidligere aktiv drenering fra øret innen de siste 90 dagene.
- ▶ Tidligere plutselig eller raskt økende hørselstap over de siste 90 dagene.
- ▶ Akutt eller kronisk svimmelhet.
- ▶ Unilateral hørselstap som har kommet plutselig eller nylig innen de siste 90 dagene.
- ▶ Audiometrisk luft-ben-gap lik eller større enn 15 dB ved 500 Hz, 1000 Hz, og 2000 Hz.
- ▶ Synlig bevis på opphopning av ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
- ▶ Smerte eller ubehag i øret.

Produktsikkerhet



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot ekstrem varme. Ikke utsett dem for direkte sollys.



NB!

- ▶ Ikke tørk apparatene i mikrobølgeovnen.



NB!

Forskjellige typer sterk stråling, f.eks. under røntgen- eller MRI-hodeundersøkelser, kan skade apparater.

- ▶ Ikke bruk apparatene under disse eller lignende prosedyrer.

Svakere stråling, f.eks. fra radioutstyr eller flyplassikkerhet, skader ikke apparatene.



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot høy fuktighet. Ikke bruk dem i dusjen, eller når du tar på deg makeup, parfyme, aftershave, hårspray eller solkrem.



I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst utstyr.

- ▶ Kontakt lokale myndigheter for videre informasjon.

**NB!**

Enhetene er utviklet for å overholde internasjonale standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men interferens med nærliggende elektroniske apparater kan oppstå. Dersom dette skjer, flytter du unna kilden til interferens.

**NB!**

Enhetene dine er i samsvar med internasjonale standarder.

Det kan imidlertid ikke garanteres at alle produktene på markedet fungerer interferensfritt, for eksempel kan enkelte induksjonskomfyrer skape lydinterferens.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Høyre:

Servicedatoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Kjøpsdato:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspesialist



Godkjent produsent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Tlf. +49 9131 308 0

Din kontakt i Norge

Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse

Postboks 378 Sentrum
0102 Oslo

Telefon 22 63 22 22

Order/Item No. 109 653 28 | D00190414
Document No. 03862-99T01-5200 NO-DNK | D00188383
Master Rev01, 01.2019
© 02.2019, Signia GmbH. All rights reserved

CE
0123

www.signia-hearing.no