

I-øret høreapparater

Insio Nx CIC, Insio Nx IIC

Bruksanvisning



Innhold

Velkommen	4
<hr/>	
Høreapparatene dine	5
<hr/>	
Type apparat	5
Bli kjent med høreapparatene dine	5
Komponenter og navn	6
Kontroller	7
Lytteprogrammer	8
Funksjoner	9
Batterier	10
<hr/>	
Batteristørrelse og tips om håndtering	10
Skifte batterier	11
Daglig bruk	12
<hr/>	
Slå på og av	12
Sette inn og ta ut høreapparatene	13
Justere volumet	14
Skifte lytteprogram	15
Videre justeringer (valgfritt)	15
Spesielle lyttesituasjoner	16
<hr/>	
Telefonbruk	16

Vedlikehold og pleie	17
Høreapparater	17
Profesjonelt vedlikehold	18
Mer informasjon	19
Sikkerhetsinformasjon	19
Trådløs funksjon	19
Tilbehør	19
Symboler som brukes i dette dokumentet	20
Feilsøking	20
Service og garanti	22

Velkommen

Takk for at du velger våre høreapparater til å følge deg gjennom hverdagen din. Som alt som er nytt, vil det ta litt tid før du blir kjent med dem.

Denne veiledningen, sammen med støtte fra høreapparatspesialisten, vil hjelpe deg med å forstå fordelene og forbedringene som høreapparaterne kan gi deg i din hverdag.

For å få mest mulig ut av høreapparaterne, anbefales det at du bruker dem hver dag, hele dagen. Dette hjelper deg med å bli vant til dem.



FORSIKTIG

Det er viktig å lese denne bruksanvisningen og sikkerhetshåndboken nøye og i sin helhet. Følg sikkerhetsinformasjonen for å unngå skade eller personskade.

Høreapparatene dine



Denne bruksanvisningen beskriver ekstrafunksjoner som høreapparatene dine kan ha.

Spør høreapparatspesialisten din om å vise funksjonene som gjelder for høreapparatene dine.

Type apparat

Høreapparatene dine er skreddersydde modeller som er produsert individuelt, basert på anatomien i ørene dine. De sitter direkte i øret, enten i øremuslingen, eller dypere inne i øregangen. De er ikke ment for barn under 3 år eller personer med en mental alder på under 3 år.

Bli kjent med høreapparatene dine

Det anbefales at du gjør deg kjent med de nye høreapparatene dine. Med apparatene dine i hånden, prøv å bruke kontrollene og legg merke til hvor de finnes på apparatet. Dette vil gjøre det enklere for deg å kjenne og trykke på kontrollene mens du bruker høreapparatene.




Dersom du har problemer med å trykke på kontrollene på høreapparatene dine mens du bruker dem, kan du bruke en fjernkontroll for å betjene apparatene. Med en egen smarttelefon-app har du enda flere kontrollmuligheter.

Komponenter og navn

Denne bruksanvisningen beskriver flere typer høreapparater. Bruk følgende bilder til å identifisere type høreapparat du bruker.

CIC

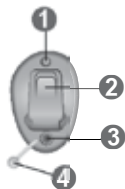

- 1 Mikrofon
 - 2 Batteriluke (med trykknappfunksjon som tilleggsutstyr)
 - 3 Ventilasjonsåpning
 - 4 Uttrekstråd
-

IIC



- 1 Ventilasjonsåpning
 - 2 Batteriluke
 - 3 Mikrofon
 - 4 Uttrekstråd
-

Kontroller

Med kontrollene kan du for eksempel justere volumet eller skifte lytteprogrammer. Høreapparatene dine har enten en batteriluke som også fungerer som en trykknapp, eller de har ingen trykknapp.

Høreapparatspesialisten har programmert funksjonene du ønsker til kontrollene.

Kontroll	Venstre	Høyre
Batteriluke med trykknappfunksjon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ingen trykknapp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Du kan også spørre din høreapparatspesialist om en fjernkontroll eller smarttelefonapp er tilgjengelig for ditt høreapparat.

Trykknappfunksjon	V	H
Lett trykk:		
Programendring	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Øk lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reduser lydstyrke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå opp	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus lydgeneratornivå ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langt trykk:		
Standby/slå på	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V = venstre, H = høyre

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Les mer i delen "Skifte lytteprogram".

Funksjoner

- Oppstartsforsinkelse** gjør det mulig å sette inn høreapparater uten pipelyd.
Les mer i delen "Slå på og av".
- Tinnitus lydgenerator** lager en lyd for å distrahere deg fra tinnitus.
- e2e wireless**-funksjonen gjør det mulig å kontrollere begge høreapparatene samtidig.
Les mer i delen "Trådløs funksjon".

Batterier

Når batteriet er svakt blir lyden svakere eller du hører et varselsignal. Batteritypen vil bestemme hvor lang tid det går før du må skifte ut batteriet.

Batteristørrelse og tips om håndtering

Be din høreapparatspesialist om anbefalte batterier.


Batteristørrelse:	10
-------------------	----

- Bruk alltid riktig batteristørrelse for høreapparatene.
- Fjern batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke høreapparatene på flere dager.
- Ta alltid med deg reservebatterier.
- Fjern tomme batterier med en gang og følg lokale resirkuleringsregler for avfallshåndtering.

Skifte batterier


Ta ut batteriet:

- ▶ Åpne batteriluken.
- ▶ Fjern batteriet for hånd.

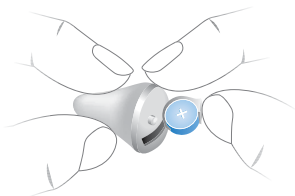

Sette inn batteriet:

- ▶ Hvis batteriet har en beskyttelsesfilm, fjerner du den når du er klar for å bruke batteriet.
- ▶ Sett inn batteriet slik at symbolet "+" vender opp.

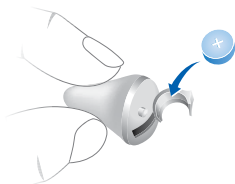

- ▶ Lukk batteriluken forsiktig. Hvis du føler motstand er ikke batteriet satt helt inn.

Ikke forsøk å lukke batteriluken med makt.
Den kan bli skadet.

Daglig bruk

Slå på og av

Du har følgende valgmuligheter for å slå høreapparatene på eller av.

Via batteriluken:

- ▶ Slå på: Lukk batteriluken.
Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
- ▶ Slå av: Åpne batteriluken helt.

Via trykknapp:

- ▶ Slå på eller av: Trykk og hold trykknappen i flere sekunder. Se delen "Kontroller" for innstillingene av kontrollene.

Etter oppstart, forblir **tidligere** brukt lydstyrke og lytteprogram innstilt.

Når du bruker høreapparatene, kan en varseltone indikere når et apparat er slått på eller av.

Når **oppstartsforsinkelsen** er aktivert, slås høreapparatene på etter en forsinkelse på flere sekunder. I løpet av denne tiden kan du sette inn høreapparatene i ørene uten å oppleve ubehagelig feedback.

"Oppstartsforsinkelse" kan aktiveres av høreapparatspesialisten din.


Sette inn og ta ut høreapparatene

Høreapparatene dine har blitt fininnstilt for ditt høyre og venstre øre. Merkingen eller fargen på høreapparatene angir siden:

- rødt eller påtrykt "H" = høyre øre
- blått eller påtrykt "V" = venstre øre

Sette inn et høreapparat:

- ▶ Trykk høreapparatet forsiktig inn i øregangen. Vær spesielt oppmerksom på uttrekkstråden, som indikerer undersiden.
- ▶ Vri det noe til det sitter godt fast.
Åpne og lukk munnen for å unngå at luft samles i øregangen.

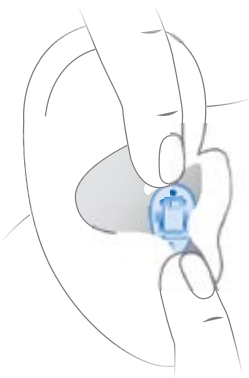

i

- Det kan være nyttig å sette inn **høyre** høreapparat med **høyre** hånd og **venstre** høreapparat med **venstre** hånd.
- Dersom du har problemer med å sette inn høreapparatet, bruker du den andre hånden til å forsiktig dra ned øreflippen. Dette åpner øregangen og gjør det enklere å sette inn høreapparatet.

Ta ut et høreapparat:



NB!

Ikke dra i batteriluken for å fjerne høreapparatet.
Dette kan skade høreapparatet ditt.

- ▶ Press forsiktig bak på øret for å løsne høreapparatet.
- ▶ Fjern høreapparatet ved å trekke uttrekkstråden mot baksiden av hodet.

Rengjør og tørk høreapparatene dine etter bruk. Les mer i delen "Vedlikehold og pleie".

Justere volumet

Høreapparatene dine justerer automatisk lydstyrken etter lyttesituasjonen.

- ▶ Hvis du foretrekker manuell volumjustering, kan du trykke på trykknappen.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av trykknappen.

Et ekstra signal kan indikere endringen av lydstyrken.

Skifte lytteprogram

Avhengig av lyttesituasjonen, justerer høreapparatene automatisk lyden.

Høreapparatene kan også ha flere lytteprogrammer som lar deg endre lyden etter behov. Et ekstra signal kan indikere endringen av programmet.

- ▶ Trykk kort på trykknappen for å skifte lytteprogrammet.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av kontrollene.

Du finner en liste med lytteprogrammene dine i avsnittet "Lytteprogrammer".

Standardvolumet gjelder.

Videre justeringer (valgfritt)


Du kan også bruke trykknappen til å endre andre egenskaper, for eksempel, nivået til tinnitus-lydgenerator.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av kontrollene.

Spesielle lyttesituasjoner

Telefonbruk

Når du snakker i telefonen, snur du røret litt slik at det ikke dekker øret helt.

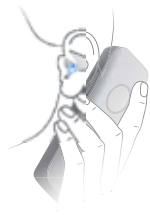

Telefonprogram

Det kan hende at du foretrekker en bestemt lydstyrke når du bruker telefonen. Be høreapparatspesialisten om å konfigurere et telefonprogram.

- Bytt til telefonprogrammet når du snakker i telefonen.

Hvis et telespoleprogram er konfigurert for høreapparatet ditt, er dette oppført i avsnittet "Lyttprogrammer".

Vedlikehold og pleie

For å forhindre skade, er det viktig at du tar vare på høreapparatene og følger noen grunnleggende regler, som snart blir en del av din daglige rutine.

Høreapparater


Tørking og oppbevaring

- ▶ Tørk høreapparatene dine over natten.
- ▶ Når høreapparatene ikke skal brukes på lenge, oppbevarer du dem i tørre omgivelser med åpen batteriluke og batteriene fjernet.
- ▶ Kontakt din høreapparatspesialist for mer informasjon.

Rengjøring

Av hensyn til hygiene og for å opprettholde funksjonalitet, må du rengjøre høreapparatene dine hver dag.

- ▶ Rengjør høreapparatet daglig med en myk, tørr klut.
- ▶ Høreapparatene dine kan ha en voksbeskyttelse. Dette hindrer inntrengning av ørevoks. Vær forsiktig slik at du ikke skader voksbeskyttelsen når du rengjør høreapparatene.

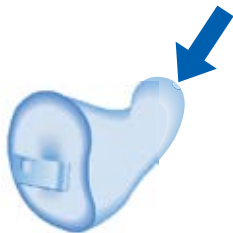

- ▶ Bruk aldri rennende vann eller senk apparatene ned i vann.
- ▶ Bruk aldri makt når du rengjør.
- ▶ Spør høreapparatspesialisten om anbefalte rengjøringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett eller mer informasjon om hvordan du holder høreapparatene i god stand.



Profesjonelt vedlikehold

Høreapparatspesialisten kan utføre en grundig profesjonell rengjøring og vedlikehold.

I tilfelle voksbeskyttelsen eller mikrofonbeskyttelsen (vindskjermingen) må skiftes, bør dette gjøres av en fagkyndig.

Spør høreapparatspesialisten om hvor ofte du må utføre vedlikehold og for å få støtte.

Vedlikeholdsprodukter kan du kjøpe i vår webshop:
www.webshop.sivantos.no

Mer informasjon

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetshåndboken som ble levert med enheten for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Trådløs funksjon

Høreapparatene kan ha trådløs funksjon. Dette gjør det mulig å synkronisere mellom de to høreapparatene:

- Dersom du endrer program eller volum på ett høreapparat blir det andre endret automatisk.
- Begge høreapparater tilpasser seg automatisk lyttesituasjonen samtidig.

Se avsnittet "Funksjoner" for å se om høreapparatene dine har trådløs funksjon.

Tilbehør

Type tilgjengelig tilbehør avhenger av type apparat. Eksempler: En fjernkontroll, en streamer eller en app på en smarttelefon som fjernkontroll.

Spør din høreapparatspesialist om ytterligere informasjon.

Symboler som brukes i dette dokumentet



Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Indikerer mulig materiell skade.



Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten.

Feilsøking

Problem og mulige løsninger

Lyden er svak.

- Øk lydstyrken.
 - Lukk batteriluken helt forsiktig.
 - Rengjør høreapparatet.
 - Skift ut det tomme batteriet.
 - Be høreapparatspesialisten din om å skifte ut voksbeskyttelsen og/eller mikrofondekslet.
-

Høreapparatet avgir pipelyder.

- Prøv å sette inn høreapparatet så det sitter godt.
 - Demp lydstyrken.
 - Rengjør høreapparatet.
-

Problem og mulige løsninger

Lyden er fordreid.

- Demp lydstyrken.
 - Skift ut det tomme batteriet.
 - Rengjør høreapparatet.
 - Be høreapparatspesialisten din om å skifte ut voksbeskyttelsen og/eller mikrofondekslet.
-

Høreapparatet sender ut signaltoner.

- Skift ut det tomme batteriet.
-

Høreapparatet fungerer ikke.

- Slå på høreapparatet.
 - Lukk batteriluken helt forsiktig.
 - Skift ut det tomme batteriet.
 - Kontroller at batteriet settes inn på riktig måte.
 - Oppstartsforsinkelsen er aktiv. Vent flere sekunder og forsøk på nytt.
-

Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du støter på ytterligere problemer.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Høyre:

Servicedatoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Kjøpsdato:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspesialist



Godkjent produsent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Tlf. +49 9131 308 0

Din kontakt i Norge

Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse:

Postboks 378 Sentrum
0102 Oslo

Telefon 22 63 22 22

D00178695/1/500/0418 | D00178695
Document No. 03429-99T01-5200 NO-DNK | D00171654
Master Rev01, 01.2018
© 04.2018, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.no