

CROS Pure Charge&Go X

Bruksanvisning



Innhold

Velkommen	4
<hr/>	
Din CROS-sender	5
Komponenter og navn	7
Kontroller	9
Lytteprogrammer	10
Signaltoner	10
Daglig bruk	11
<hr/>	
Lading	11
Slå på og av	12
Skifte til hvilemodus	13
Sette inn og ta ut senderen	14
Skifte lytteprogram	17
Bluetooth	17
Vedlikehold og pleie	18
<hr/>	
Sender	18
Dome/propp	20
Profesjonelt vedlikehold	22
Viktig sikkerhetsinformasjon	23
<hr/>	

Mer informasjon	25
Sikkerhetsinformasjon	25
Tilleggsutstyr	25
Symbolforklaringer	25
Drifts-, transport- og oppbevaringsforhold	27
Informasjon om avfallshåndtering	28
Feilsøking	29
Samsvarsinformasjon	30
Viktig sikkerhetsinformasjon	32
Personsikkerhet	32
Produktsikkerhet	35
Service og garanti	37

Velkommen

Takk for at du valgte vårt høreapparattilbehør.

Denne veiledningen, sammen med støtte fra høreapparatspesialisten, vil gi deg bedre forståelse av fordelene og forbedringene i livskvalitet som dette tilbehøret kan gi deg.



FORSIKTIG


Det er viktig å lese hele denne bruksanvisningen nøye. Følg sikkerhetsinformasjonen for å unngå materiell skade eller personskade.

Din CROS-sender

CROS-løsningene er beregnet for mennesker med alvorlig hørselstap på ett øre, som ikke har nytte av et høreapparat. En CROS-sender på dette øret fanger opp lyd fra denne siden og overfører den til høreapparatet på det andre øret. Dette gjør at brukeren av høreapparatet kan høre lyder fra begge sider.

CROS-sender

Høreapparat

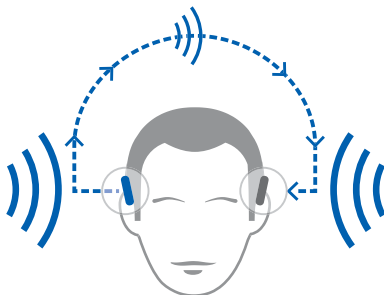

To løsninger er tilgjengelige:

- CROS-løsning:

For personer med normal hørsel på det ene øret og alvorlig hørselstap på det andre. Lyder fra siden med hørselstap fanges opp og sendes trådløst til siden med god hørsel.

- BiCROS-løsning:

For personer med alvorlig hørselstap på det ene øret og mindre alvorlig hørselstap på det andre. Lyder fra siden med mest alvorlig hørselstap fanges opp og sendes trådløst til siden med bedre hørsel. Høreapparatet bearbejder og forsterker lydene fra begge sider.


CROS-senderen fungerer med bestemte trådløse høreapparater. Høreapparatspesialisten vil gi deg råd om de kompatible modellene.



NB!

Denne brukerveiledningen gjelder bare for CROS-senderen. Høreapparatet har en egen brukerveiledning.

Komponenter og navn

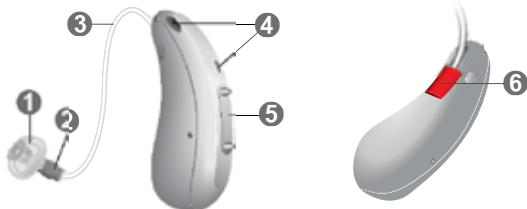

1 Dome

2 Høyttaler

3 Receiver





4 Mikrofonåpninger

5 Vippebryter (kontroll,
på/av-bryter)

6 Sideindikator
(rød = høyre øre,
blå = venstre øre) og
receiverfeste



Dome, høyttaler og receiver brukes bare til å holde apparatet på øret. Ingen lyd avspilles.

Du kan bruke følgende standard domer:

Standard domer	Størrelse
<input type="radio"/>  Click Sleeve (åpen eller tett)	
<input type="radio"/>  Click Dome™ (åpen eller tett)	
<input type="radio"/>  Click Dome semi-open	
<input type="radio"/>  Click Dome dobbel	

Du kan enkelt skifte ut standard dome. Les mer i avsnittet "Vedlikehold og pleie".

Tilpassede skall/propper

<input type="radio"/>  Tilpasset skall	
<input type="radio"/>  Click Propp	

Kontroller

Med vippebryteren kan du, for eksempel, bytte lytteprogram. Høreapparatsspesialisten har programmert funksjonene du ønsker til vippebryteren.

Vippebryterfunksjon	V	H
Lett trykk:		
Lytteprogram opp/ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hold inne i ca. 2 sekunder:		
Lytteprogram opp/ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hold inne i mer enn 3 sekunder:		
Slå på/av	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V = venstre, H = høyre



Du kan også bruke en fjernkontroll til å endre og justere volumet på høreapparatene. Med vår smarttelefonapp har du enda flere kontrollmuligheter.

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Les mer i delen "Skifte lytteprogram".

Signaltoner

Signaltoner fra CROS-senderen, som fra et svakt batteri, sendes til høreapparatet.

Be høreapparatspesialisten om å konfigurere signaltonene.

Daglig bruk

Lading

Sett apparatet inn i laderen.

- ▶ Følg anvisningene i bruksanvisningen for laderen. Du kan også finne nyttige tips om lading i bruksanvisningen for laderen.

Varsel om lavt strømnivå

Du vil høre et lydsignal som varsler om at det er lite strøm på strømcellen. Signalet gjentas hvert 20. minutt. Avhengig av bruken av enheten, må du nå lade enheten i løpet av omtrent 1,5 timer. Ellers slutter de å fungere.



Slå på og av

Du har følgende valgmuligheter for å slå enheten din på eller av.

Via lader:

- ▶ Slå på: Ta enheten ut av laderen.
Oppstartmelodien spilles i enheten din. **Standard** lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
- ▶ Slå av: Sett enheten inn i laderen.

Husk at laderen må være koblet til strømforsyningen. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for laderen.

Via vippebryter:

- ▶ Slå på: Trykk og hold inne den nedre delen av vippebryteren til avspillingen av oppstartmelodien begynner. Slipp vippebryteren mens melodien spilles.
Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn.
- ▶ Slå av: Trykk og hold inne øvre eller nedre del av vippebryteren i flere sekunder. En avslutningsmelodi spilles av.



Se også tips om lading i bruksanvisningen for laderen.

Skifte til hvilemodus

Med en fjernkontroll eller en smarttelefonapp kan du sette apparatet i hvilemodus. Dette slår av lyden på apparatet. Når du går ut av hvilemodus, vil **tidligere** brukt volum og lytteprogram stilles inn.

Merknad:

- I hvilemodus er apparatet **ikke** slått helt av. Det trekker litt strøm.

Vi anbefaler derfor at du bare bruker hvilemodus i korte perioder.

- Hvis du vil gå ut av hvilemodus og fjernkontrollen eller appen ikke er innen rekkevidde: Slå apparatet av og på igjen (med vippebryteren eller ved å plassere det en kort tid i laderen, til en eller flere oransje LED-lamper lyser). I dette tilfellet stilles **standard** lydstyrke og lytteprogram inn.

Sette inn og ta ut senderen

Fargede markører indikerer siden:


- rød markør = høyre øre
- blå markør = venstre øre



Sette inn:

- For Click Sleeves, pass på at den bøyde delen på Click Sleeve stemmer med den bøyde delen på receiveren.

Riktig:

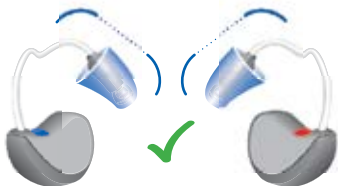

Feil:




► Hold receiveren etter den bøyde delen som er nærmest domen/proppen.

► Sett domen/proppen forsiktig inn i ørekanalen ①.

► Vri det noe til det sitter godt fast.

Åpne og lukk munnen for å unngå at luft samles i øregangen.

► Løft enheten og før den over øvre del av øret ②.

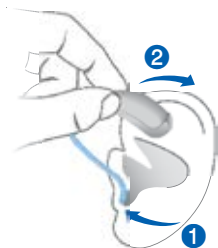

FORSIKTIG

Skadefare!

► Sett inn domen/proppen forsiktig og ikke for dypt inn i øret.



- Det kan være nyttig å sette inn **høyre** enhet med **høyre** hånd og **venstre** enhet med **venstre** hånd.
- Dersom du har problemer med å sette inn domen/proppen, bruker du den andre hånden til å forsiktig dra ned øreflippen. Dette åpner øregangen og gjør det enklere å sette inn domen/proppen.


Den ekstra støttråden hjelper til med å holde domen/proppen sikkert på plass i øret. Slik setter du støttråden i posisjon:

- ▶ Bøy støttråden og plasser den forsiktig inn i øret (se bildet).



Ta ut:

- ▶ Løft enheten og før den over øvre del av øret **1**.
- ▶ Dersom enheten er utstyrt med et tilpasset skall eller en Click Propp, fjerner du denne ved å dra den lille uttrekkstråden mot bakhodet.
- ▶ For alle andre domer: Ta høyttaleren i ørekanalen med to fingre og dra den forsiktig ut **2**. Ikke trekk i receiveren (ledningen).

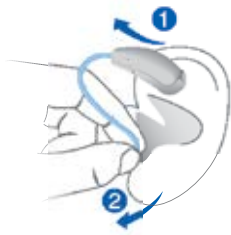

FORSIKTIG

Skadefare!

- ▶ I svært sjeldne tilfeller kan domen/proppen forbli i øret når enheten fjernes. Hvis dette skjer, må du få domen/proppen fjernet av en person i helsevesenet.

Rengjør og tørk av enheten etter bruk. Les mer i delen "Vedlikehold og pleie".

Skifte lytteprogram

Avhengig av lyttesituasjonen, justerer enheten automatisk lyden.

Enheden kan også ha flere lytteprogrammer som lar deg endre lyden etter behov. Et ekstra signal kan indikere endringen av programmet.

- ▶ Trykk kort på vippebryteren for å skifte lytteprogram.

Se delen "Kontroller" for innstillingen av vippebryteren.

Du finner en liste med lytteprogrammene dine i avsnittet "Lytteprogrammer".

Standardvolumet gjelder.

Bluetooth

Apparatet er utstyrt med Bluetooth-teknologi for å muliggjøre streaming fra mobiltelefoner eller andre kompatible apparater.

Bluetooth-funksjonen kan være begrenset om bord i fly, spesielt under letting og landing. I så fall kan du slå av Bluetooth-funksjonen i apparatet via smarttelefonappen.

Vedlikehold og pleie

For å forhindre skade er det viktig at du tar vare på enheten og følger noen grunnleggende regler, som snart blir en del av din daglige rutine.

Sender

Rengjøring

Enheter din har et beskyttende belegg. Men hvis den ikke rengjøres regelmessig, kan du skade enheten eller forårsake personskade.

- ▶ Rengjør enheten daglig med en myk, tørr klut.
- ▶ Aldri bruk rennende vann eller senk apparatene ned i vann.
- ▶ Bruk aldri makt når du rengjør.
- ▶ Spør høreapparatspesialisten om anbefalte rengjøringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett eller mer informasjon om hvordan du holder enheten i god stand.



Tørke

Laderen tørker enheten under ladingen. Du kan også bruke tradisjonelle produkter til å tørke enheten med. Spør din høreapparatspesialist om anbefalte tørkeprodukter og individuell informasjon om når du skal tørke enheten din.

Oppbevaring

- Korttidsoppbevaring (noen dager): Slå av apparatet med trykknappen, eller sett det i den tilkoblede laderen.

Laderen må være koblet til strømforsyningen. Hvis du plasserer apparatet i laderen når det ikke er koblet til strømforsyningen, slår **ikke** apparatet seg av.

Vær oppmerksom på at når du slår av apparatet med en fjernkontroll eller en app på smarttelefonen, er apparatet **ikke** slått helt av. Det er i hvilemodus og bruker fremdeles litt strøm.

- Oppbevaring over lengre tid (uker, måneder, ...): Først må du lade apparatet. Slå det av med vippebryteren før oppbevaring. Vi anbefaler bruk av tørkeprodukter under oppbevaring av apparatet.

Med 6 måneders mellomrom må du lade opp apparatet for å unngå dyputlading av strømcellen. Strømceller som er dyputladet, kan ikke lades på nytt og må skiftes ut. Vi anbefaler opplading oftere enn med 6 måneders mellomrom.

Overhold oppbevaringsbetingelsene i delen "Drifts-, transport- og oppbevaringsforhold".

Dome/propp


Rengjøring

Cerumen (ørevoks) kan samles opp på domen/proppen.
Rengjør domen/proppen daglig.

For alle typer domer/propper:


- Rengjør domen/proppen med et mykt og tørt lommetørkle rett etter at den er fjernet.

Dette forhindrer at cerumen blir tørr og hard.

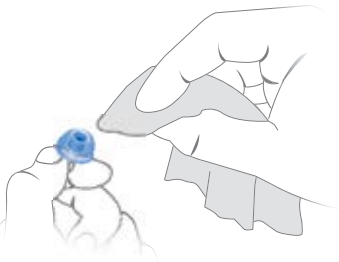

For Click Dome eller Click Sleeves:

- Klem spissen på domen.

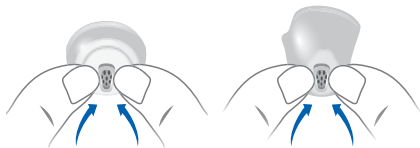


Utskifting

Skift ut standard dome omtrent hver tredje måned. Skift dem ut oftere hvis du oppdager sprekker eller andre endringer. Fremgangsmåten for utskifting av standard dome avhenger av type dome. I delen "Komponenter og navn", har høreapparatspesialisten merket din type dome.

Skifte ut Click Dome

- ▶ Hvis du vil fjerne den gamle Click Dome, følger du instruksjonene på emballasjen for Click Dome. Pass på at du ikke trekker i receiveren (ledningen).

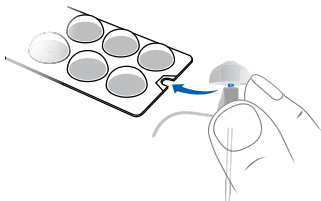

- ▶ Vær spesielt nøye med at den nye Click Dome klikker på plass.
- ▶ Kontroller at den nye Click Dome sitter godt fast.



Skifte ut Click Sleeve

- ▶ Vri Click Sleeve med innsiden ut.
- ▶ Grip Click Sleeve og høyttaleren (ikke receiveren) med fingrene og trekk av Click Sleeve.
- ▶ Vær spesielt nøye med at den nye Click Sleeve klikker på plass.



Profesjonelt vedlikehold

Høreapparatspesialisten kan utføre en grundig profesjonell rengjøring og vedlikehold.

Tilpassede skall/propper og voksfiltre bør skiftes ut av en høreapparatspesialist ved behov.

Kontakt høreapparatspesialisten for informasjon om hvor ofte du må utføre vedlikehold og for å få teknisk hjelp.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne delen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon om strømcellen. Se sikkerhetshåndboken som ble levert med høreapparatene for ytterligere sikkerhetsinformasjon.



ADVARSEL

En strømcelle (oppladbart litium-ion-batteri) er permanent innebygd i apparatet. Feil bruk av strømcellen eller apparatet kan ødelegge strømcellen.

Fare for personskader, brann eller eksplosjon!

- ▶ Følg sikkerhetsanvisningene for strømceller i dette kapittelet.

- ▶ Overhold driftsbetingelsene. Se delen "Drifts-, transport- og lagringsforhold".
- ▶ Det er ekstra viktig å beskytte enheten mot ekstrem varme (f.eks. åpen ild, mikrobølgeovn, induksjonsovn eller andre induksjonsfelt) og sollys.
- ▶ Bruk bare den godkjente laderen til å lade opp enheten dine. Be din høreapparatspesialist om hjelp.
- ▶ Ikke demonter strømcellen.

Utskifting og reparasjon må utføres av fagfolk. Derfor:

- ▶ Ikke reparer eller skift ut strømcellen på egen hånd.
- ▶ Ikke bruk enheten når deres ytelse etter lading reduseres vesentlig.
- ▶ Hvis en strømcelle skulle sprekke eller eksplodere, noe som er usannsynlig, må alle brennbare materialer holdes borte fra den.

I alle de nevnte tilfellene må du levere enheten inn til høreapparatspesialisten.

Mer informasjon

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetshåndboken som ble levert med høreapparatet for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Tilleggsutstyr

Du kan bruke en smarttelefonapp som en praktisk fjernstyring av apparatet. Appen lar deg også deaktivere signaltoner, opprette individuelle lydprofiler og mange andre funksjoner.

Spør din høreapparatspesialist om ytterligere informasjon.

Symbolforklaringer

Symboler som brukes i dette dokumentet



Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Indikerer mulig materiell skade.



Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten.

Symboler på enheten eller emballasjen



CE-samsvarsinformasjon, bekrefter samsvar med visse europeiske direktiver, se delen "Samsvarsinformasjon".



EMC- og radiokommunikasjonssamsvarsmerke for Australia, se delen "Samsvarsinformasjon".



Angir enhetens godkjent produsent.



Enheten må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Les mer under "Avfallshåndtering".



Les og følg anvisningene i bruksanvisningen.



Medisinsk instrument

Drifts-, transport- og oppbevaringsforhold

Apparatet opererer under følgende forhold (gjelder også mellom bruk):

Driftsvilkår	Utlading	Lading
Temperatur	0 til 50 °C (32 til 122 °F)	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Relativ luftfuktighet	5 til 93 %	5 til 93 %
Atmosfærisk trykk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Under lengre perioder med transport og oppbevaring må følgende betingelser overholdes:

	Oppbevaring	Transport
Temperatur (anbefalt)	10 til 25 °C (50 til 77 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Temperatur (maksimalt spekter)	10 til 40 °C (50 til 104 °F)	-20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
Relativ luftfuktighet (anbefalt)	20 til 80 %	5 til 90 %
Relativ luftfuktighet (maksimalt spekter)	10 til 80 %	5 til 90 %
Atmosfærisk trykk	700 til 1060 hPa	700 til 1060 hPa

Vær oppmerksom på at du må lade opp apparatet minst hver 6. måned. For mer informasjon, se avsnitt "Vedlikehold og pleie".

Andre betingelser kan gjelde for andre deler, for eksempel laderen.



ADVARSEL

Fare for personskader, brann eller eksplosjon under transport.

- ▶ Transporter strømceller og enheten i samsvar med gjeldende forskrifter.

Informasjon om avfallshåndtering

- ▶ For å unngå miljøforurensning må du ikke kaste strømcellene eller enheten sammen med husholdningsavfallet.
- ▶ Resirkuler strømcellene og enheten i samsvar med gjeldende forskrifter.

Feilsøking

Problem og mulige løsninger

Lyden er svak.

- Lad apparatet.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
-

Høreapparatet avgir pipelyder.

- Prøv å sette domen/proppen inn på nytt til den sitter godt fast.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
 - Se brukerhåndboken som følger med høreapparatet.
-

Lyden er fordreid.

- Lad apparatet.
 - Rengjør eller skift ut domen/proppen.
 - Se brukerhåndboken som følger med høreapparatet.
-

Høreapparatet sender ut signallyder.

- Lad apparatet.
 - Se brukerhåndboken som følger med høreapparatet.
-

Apparatet fungerer ikke.

- Slå apparatet på.
 - Lad apparatet. Følg også med på status LED-lampene på laderen.
-

Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du opplever ytterligere problemer.

Samsvarsinformasjon

CE-merkingen indikerer samsvar med følgende europeiske direktiver:

- 93/42/EEC vedrørende medisinske apparater
- 2014/53/EU RED vedrørende radioutstyr
- 2011/65/EU RoHS vedrørende begrensning av farlige stoffer

Full tekst til samsvarserklæringen kan hentes fra www.signia-hearing.com/doc.

ACMA-samsvarsmerket  indikerer samsvar

med standardene for elektromagnetisk interferens fra Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Enheter med FCC-merke er i overensstemmelse med standardene med FCC for elektromagnetisk interferens.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og ISEDs lisensfritatte RSS-spesifikasjoner.

Bruk må skje under følgende to betingelser:

- apparatet må ikke forårsake skadelig interferens.
- apparatet må tåle eventuell interferens det måtte motta, inklusive interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksene, forårsake forstyrrende interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker forstyrrende interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe du kan fastslå ved å slå utstyret av og på, oppfordrer vi brukeren til å forsøke å korrigere denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottaksantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den det andre utstyret er koblet til.
- Be om hjelp fra forhandleren, eller en erfaren radio-/ fjernsynstekniker.

FCC-forholdsregel: Endringer og modifikasjoner som ikke er offisielt godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å betjene utstyret ugyldig.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Personsikkerhet

Denne enheten er ikke ment for barn under 3 år eller personer med en mental alder på under 3 år.



FORSIKTIG

Skadefare!

- ▶ Alltid bruk lyd giverledningen med en dome.
- ▶ Forviss deg om at domen er helt festet.



ADVARSEL

Fare for påvirkning av elektronisk utstyr!

- ▶ I områder hvor bruk av elektroniske eller trådløse enheter er begrenset, må du sjekke om enheten din må slås av.



ADVARSEL

Skadefare!

- ▶ Ikke bruk enheter som har åpenbare skader, men returner dem til salgsstedet.



ADVARSEL

Legg merke til at uautoriserte endringer av produktet kan føre til skade på produktet eller personskade.

- ▶ Bruk kun godkjente deler og tilbehør. Be din høreapparatspesialist om hjelp.



ADVARSEL

Kvelningsfare!

Apparatet ditt inneholder små deler som kan svelges.

- ▶ Hold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og psykisk utviklingshemmede.
- ▶ Ved svelging av deler, oppsøk straks lege eller sykehus.



ADVARSEL

Enheten kan redusere enkelte bakgrunnslyder, potensielt også trafikk- eller varselsignaler.



ADVARSEL

Eksplisjonsfare!

- ▶ Ikke bruk enheten din i eksplosive atmosfærer (f.eks. i gruver).

Kontraindikasjoner



ADVARSEL

Ta kontakt med en høreapparatspesialist hvis du opplever uvanlige bivirkninger som hudirritasjon, ekstrem oppsamling av ørevoks, svimmelhet, endring av hørsel eller hvis du tror at det kan være en fremmedgjenstand i ørekanalen.



ADVARSEL

En høreapparatspesialist bør gi råd til en mulig bruker om å ta kontakt med en lisensiert lege før bruk av apparatet hvis høreapparatspesialisten fastslår av brukeren har en av følgende lidelser:

- ▶ Synlig medfødt eller traumatisk misdannelse av øret.
- ▶ Tidligere aktiv drenering fra øret innen de seneste 90 dagene.
- ▶ Tidligere plutselig eller raskt økende hørselstap over de seneste 90 dagene.
- ▶ Akutt eller kronisk svimmelhet.
- ▶ Ensidig hørselstap som har kommet plutselig eller nylig i løpet av de seneste 90 dagene.
- ▶ Audiometrisk luft-ben-gap er lik eller større enn 15 dB ved 500 Hz, 1000 Hz, og 2000 Hz.
- ▶ Synlig bevis på opphopning av ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
- ▶ Smerte eller ubehag i øret.

Produktsikkerhet



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot ekstrem varme. Ikke utsett dem for direkte sollys.



NB!

- ▶ Ikke tørk apparatene i mikrobølgeovnen.



NB!

Forskjellige typer sterk stråling, f.eks. under røntgen- eller MRI-hodeundersøkelser, kan skade apparater.

- ▶ Ikke bruk apparatene under disse eller lignende prosedyrer.

Svakere stråling, f.eks. fra radioutstyr eller flyplassikkerhet, skader ikke apparatene.



NB!

- ▶ Beskytt apparatene dine mot høy fuktighet. Ikke bruk dem i dusjen, eller når du tar på deg makeup, parfyme, aftershave, hårspray eller solkrem.



I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst utstyr.

- ▶ Kontakt lokale myndigheter for videre informasjon.

**NB!**

Enhetene er utviklet for å overholde internasjonale standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men interferens med nærliggende elektroniske apparater kan oppstå. Dersom dette skjer, flytter du unna kilden til interferens.

**NB!**

Enhetene dine er i samsvar med internasjonale standarder.

Det kan imidlertid ikke garanteres at alle produktene på markedet fungerer interferensfritt, for eksempel kan enkelte induksjonskomfyrer skape lydinterferens.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Høyre:

Service datoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Kjøpsdato:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspesialist



Godkjent produsent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Tlf. +49 9131 308 0

Din kontakt i Norge

Sivantos AS
Nedre Vollgate 5
0158 Oslo

Postadresse

Postboks 378 Sentrum
0102 Oslo

Telefon 22 63 22 22

Order/Item No. 109 816 08 | D00208802
Document No. 04105-99T01-5200 NO-DNK 1 D00202819
Master Rev01, 01.2020
© 03.2020, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.no